

# 一次性使用球囊子宫支架

来自天使的关爱



型号	BUS-5型	BUS-5-II型	BUS-8型	BUS-8-II型
球囊最大容积/mL	5	5	8	8
是否配备球囊充气器	否	是	否	是



 **浙江天使医疗器械有限公司**  
Zhejiang Angel Medical Devices Co.,Ltd

地址：浙江省金华市大黄山工业区积道街338号

电话：0579-82586362

邮箱：sales@zjtsyl.com

网址：www.zjtsyl.com

邮编：321000



外形适合宫腔隔离  
够有效防止宫腔粘连



压迫面积广泛




有效预防  
减少子宫出血



禁忌症  
副作用少

## 组织结构

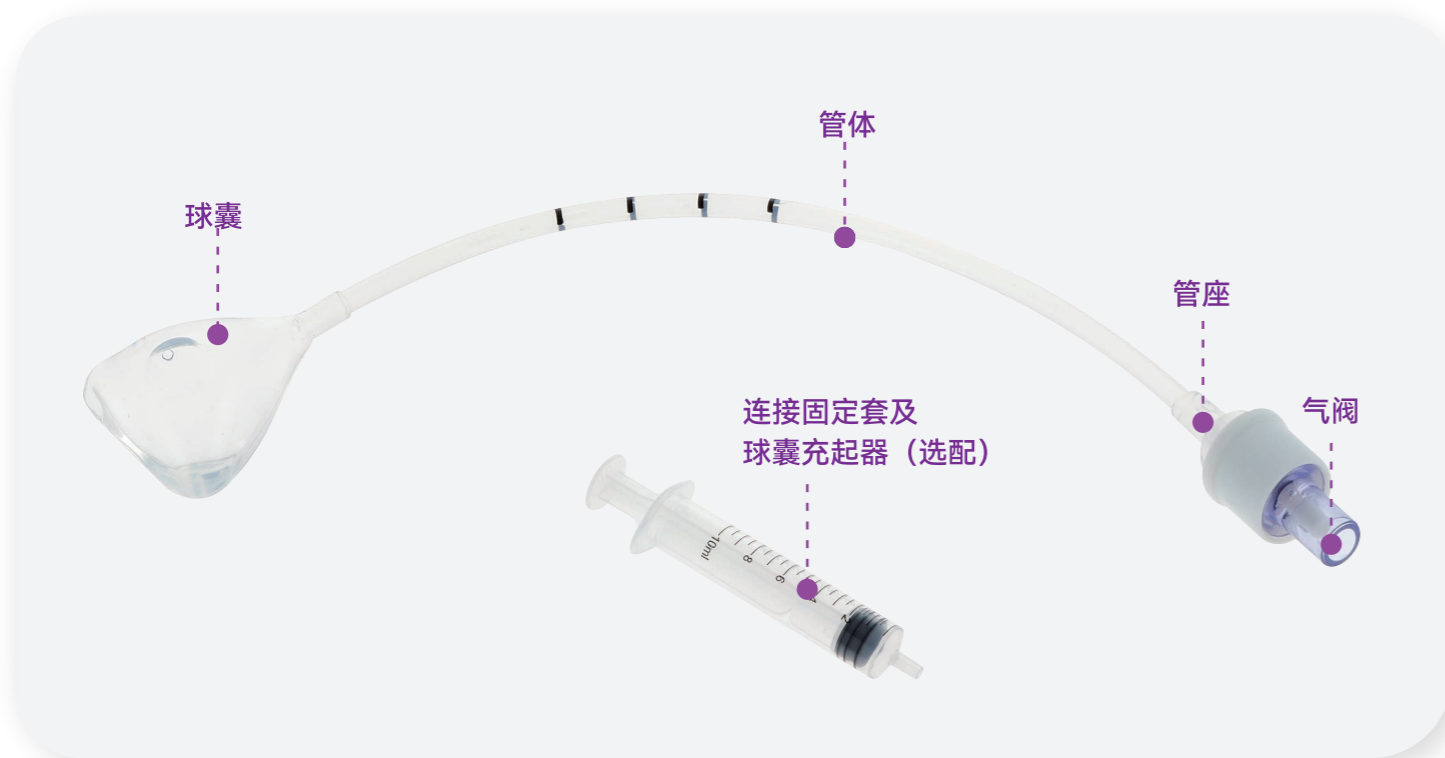

产品由管体、球囊、管座、气阀、连接固定套及球囊充起器（选配）组成。子宫支架的管体、球囊、管座采用医用硅橡胶材料制成。


## 适应范围

适用于子宫内操作及手术之后的宫内放置，以减少子宫出血，隔离受创的子宫内壁。


## 禁忌症

- ① 妊娠
- ② 全身性凝血功能障碍疾病
- ③ 发热
- ④ 近期发生子宫穿孔
- ⑤ 浸润性宫颈癌、生殖道结核未经抗结核治疗
- ⑥ 急性或者亚急性生殖道或盆腔炎症
- ⑦ 其他与各种宫腔手术和操作相关的禁忌证


## 使用步骤

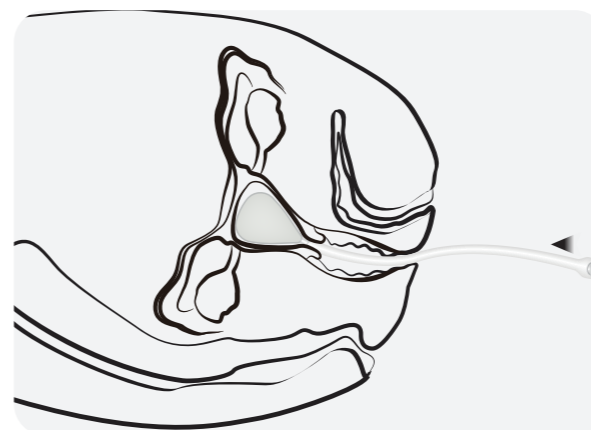

**1. 置管:** 将球囊子宫支架通过无齿钳放置子宫腔。

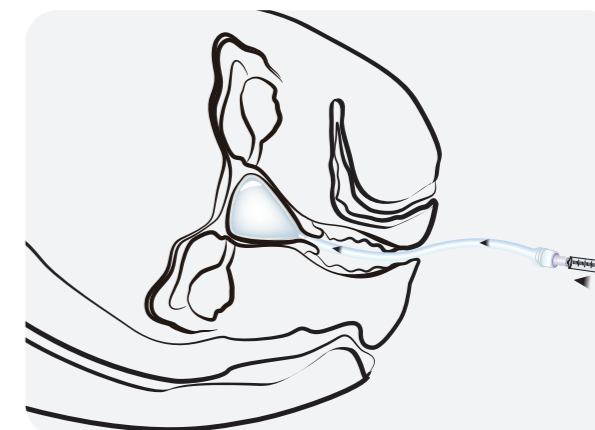


**2. 注水:** 用无菌生理盐水注入球囊，充盈囊体。

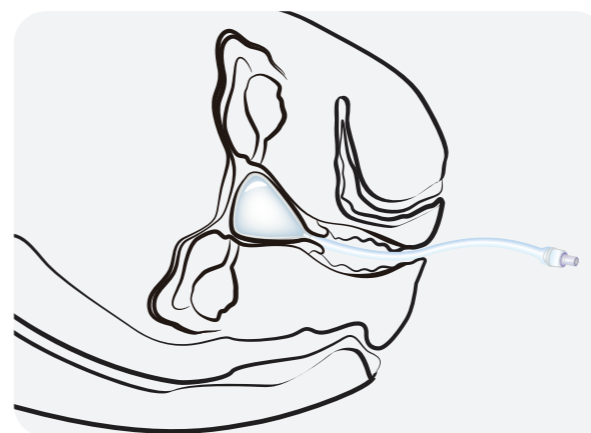

**3. 留置:** 球囊留置时间由医生根据病人实际情况决定，直至子宫内腔完全止血。

(注：用于止血时不得超过24小时，预防宫腔粘连时根据粘连的严重程度和密度来决定。)

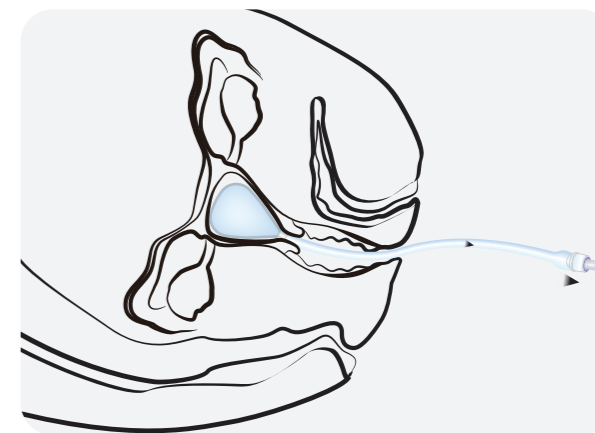

**4. 取出:** 抽出无菌生理盐水，取出产品。