



# 一次性使用产后止血球囊

来自天使的关爱



型号	TS-24F型	TS-24F-I型	TS-24F-II型
配置	止血球囊、快速灌输组件	止血球囊、50mL球囊充起器	止血球囊、快速灌输组件、50mL球囊充起器

97419d

 **浙江天使医疗器械有限公司**  
Zhejiang Angel Medical Devices Co.,Ltd

地址：浙江省金华市大黄山工业区积道街338号

电话：0579-82586362

邮箱：sales@zjtsyl.com

网址：www.zjtsyl.com

邮编：321000



## 一次性使用产后止血球囊

产后妈妈的保障，来自天使的关爱

- 压迫面积广泛，快速止血
- 操作简单，引流效果好
- 快速灌输组件，方便充盈球囊
- 材料安全，减少过敏反应



# 一次性使用产后止血球囊

来自天使的关爱




产品组成：产品由导管、球囊、导管头端、管座、排泄口、阀（二通旋塞、持续注水三通）、快速灌输组件及50mL球囊充起器（选配）组成。止血球囊的导管、球囊、导管头端、管座采用符合YY/T 0031-2008输液、输血用硅橡胶材料制成。



适应症：用于产后出血时的子宫填塞止血

禁忌症：子宫动脉出血需要手术或血管造影栓塞；子宫需切除手术；宫颈癌、化脓性感染阴道、子宫颈或子宫；弥散性血管内凝血。

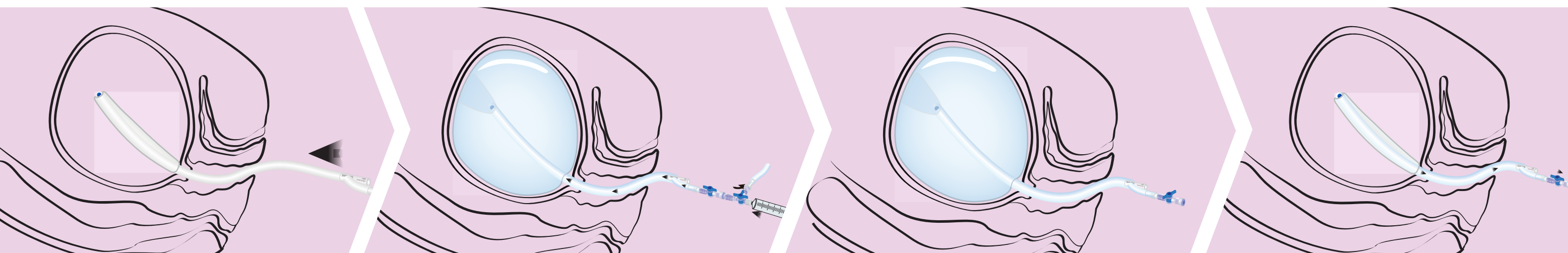

**1. 放置：**确定球囊放置路径（经阴道或经腹部），将球囊囊体放置至宫底。

**2. 注水：**通过快速灌输组件向球囊内持续注入生理盐水，填塞子宫，达到止血的效果。

**3. 观察：**观察出血情况，如有持续出血，需继续增加生理盐水（总充水量不大于标称容量500mL）。如出血停止或明显减少，说明宫腔填塞成功。

**4. 取出：**球囊放置8~24小时后，放出生理盐水，取出球囊（最长留置时间不超过24小时）。